

# Provtagning Rotavirus

1. Ta minst 2 matskedar avföring/träck från det sjuka djuret och förpacka i dubbla plastpåsar som märks på utsidan med djurets namn. Pressa ur luften ur påsen med träck innan den försluts. Lägg något absorberande mellan påsarna om träcken är lös.
2. Om prov tas från flera djur packas deras prover individuellt i påsar.
3. Lägg proverna i en provpåse (vadderat kuvert) eller paket tillsammans med en remiss, se SVA:s webbplats
4. Se till att alla uppgifter i punkterna nedan fylls i på remissen:
  - a) klinikens adress, telefonnummer, samt e-postadress
  - b) djurets namn och ålder
  - c) vilken undersökning önskas utföras:  
Rotavirus påvisande av virus (antigen ELISA)
  - d) provtagningsdatum
  - e) eventuellt andra uppgifter som du tycker att laboratoriet bör känna till.
5. Proven bör skickas till SVA samma dag. Träckprov kan dock förvaras i kylskåp över ett veckoslut innan de skickas in.