

## MIK/BKT Provtagningsinstruktion MRSA miljöprov

---

Kontakta SVA bakteriologen innan ni skickar in prover och ange ungefär hur många prover ni kommer skicka in och när, så vi kan ha substrat redo när vi får proverna.

Telefon 018 – 67 40 80 eller mail [rutin.vet.bakt@sva.se](mailto:rutin.vet.bakt@sva.se).

### Material:

- sterila handskar
- sterila kompresser
- steril NaCl-lösning
- nya, rena plastpåsar

### Utförande:

- Nya handskar för varje prov, för att undvika kontamination.
- Fukta en kompress med NaCl-lösning och gnugga över ytan som ska provtas.
- Lägg ner kompressen i påsen utan att nudda kanter eller andra ytor och knyt ihop påsen.
- Märk varje prov med plats eller annan id. Det anges på svaret.
- När många prov ska tas (till exempel vid ett utbrott) kan små ytor som dörrhandtag, lysknappar och liknande i ett och samma rum provtas med samma kompress för att hålla antalet prover nere. Sanera i så fall ytorna efter provtagning eftersom MRSA skulle kunna överföras från en yta till en annan.

Använd remissen för Bakteriologi och mykologi:

<https://www.sva.se/media/8d9ed762bc0abdd/remiss-bakteriologi-och-mykologi.pdf>

Kryssa i nedersta raden "MRSA/MRSP Selektiv anrikning". Ange under Annat material: Miljöprov /-er och ange antal prov.

Packa provet enligt anvisningar:

<https://www.sva.se/vi-erbjuder/skicka-in-prover-och-djurkroppar/skicka-prov-till-sva/>

Svar erhålles normalt efter 4-7 dagar.